


Tıbbi Görüntüleme hiç bu kadar kolay olmamıştı

- Full-HD 1920 × 1080 video kaydı
- Olağanüstü kullanım kolaylığı
- Gelişmiş arızaya karşı emniyet özellikleri
- Canlı görüntü, oynatma veya GUI için 3.5" LCD ekran



UR-4MD

Hızlı ayar ve kolay kullanım sağlayan tasarımına rağmen sağlam bir özellikler ve beceriler listesine sahip olan UR-4MD, TEAC'ın en son çıkan yüksek çözünürlüklü tıbbi video kayıt cihazıdır. Otomatik algılama özelliğine sahip video bağlantıları ve otomatik video çözünürlüğü algılama özelliği ile ayar işlemleri hızlı ve kolaydır. Ön kontrol paneli, kullanıcıların sezgisel olarak kristal netliğinde HD video ve resim kaydı yapabilmelerini sağlar. Güvenilir bir kayıt ve veri yedeklemesi için ürün bir dahili sabit diske sahiptir. Ayrıca, kullanıcılar arşivleme, paylaşma ve başka aygıtlarda ve yerlerde oynatma amacıyla eş zamanlı olarak USB belleğe ve USB sabit diske kayıt yapabilir. UR-4MD ayrıca ağa bağlanabilir.

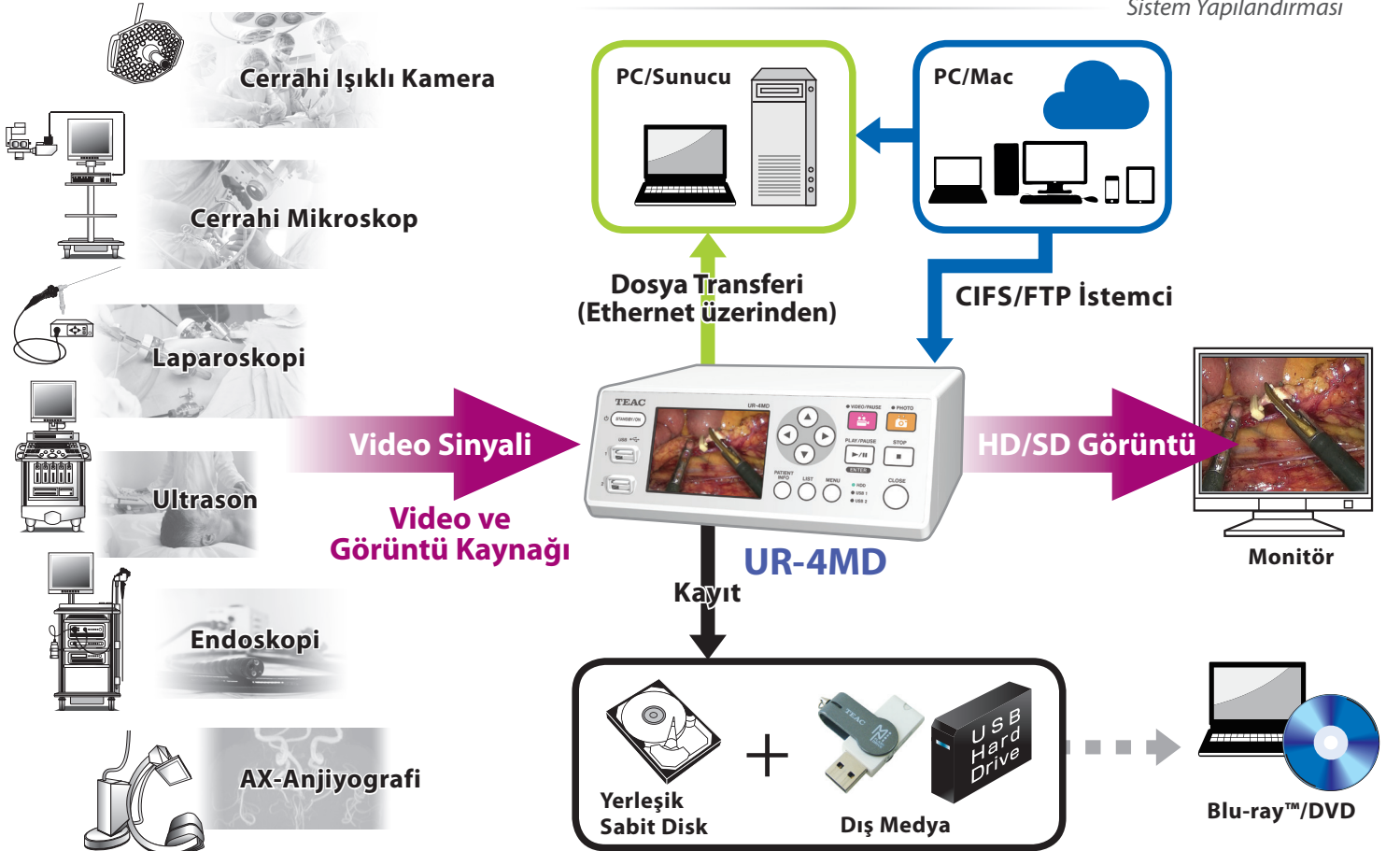

Özellikler

- **Sezgisel ve kullanımı kolay**
- **Otomatik algılama** sayesinde I/O ve video çözünürlüğünü "otomatik olarak" algılar
- Geniş kapsamlı **kayıt çözünürlükleri**
640 × 480 ila 1920 × 1080 (30 Hz / 29.97 Hz): düşürülmemiş kayıt çözünürlüğü
1920 × 1200 (1728 × 1080 olarak yeniden boyutlandırılmış): Desteklenen giriş çözünürlüğü
- **Çoklu HD ve SD giriş/çıkışı** (SDI, DVI-D, S-Video ve Kompozit)
- **Eş zamanlı olarak** çoklu ortama kayıt (2 harici USB bellek ve 1 dahili HD'ye kadar)
- **Ağ iletişimi** (FTP ve CIFS) RJ45 10/100/1000 Ethernet
- **Komut denetimi** - USB üzerinden
- Uzaktan kumanda, ayak pedalı, kart/barkod okuyucu ve klavye (isteğe bağlı)
- **Tıbbi Standartlara** uygunluk



UR-4MD

Kritik görev Operasyon Odası ortamına uygun olarak tasarlanmıştır

- ✓ Artık veri yedekleme için dahili sabit disk ile arızaya karşı emniyetli kayıt özelliği
- ✓ S.M.A.R.T. dahili sabit disk sağlığını izler/rapor eder (kendi kendini izleme, analiz ve rapor teknolojisi)
- ✓ Güç kesintisi durumunda emniyetli otomatik kapanma
- ✓ Sıvıya dayanıklı ön panel

Teknik özellikler

Genel		500 GB'lık bir sabit disk için yaklaşık kayıt süreleri		
Kayıt yapılabilen aygıtlar	USB Flash Bellek USB Sabit Disk Dahili sabit disk (500 GB)	Yüksek çözünürlük 1920 × 1080		
Ekran	3.5-inç LCD	12 Mbps	18 Mbps	24 Mbps
Güç kaynağı	AC 100–240 V, 50/60 Hz	90 saat	60 saat	45 saat
Çalışma sıcaklığı	5 ila 40 °C	Standart çözünürlük 640 × 480		
Depolama sıcaklığı	–20 ila 60 °C	5 Mbps	8 Mbps	10 Mbps
Çalışma nem oranı	%5–80 (yoğuşmasız)	180 saat	135 saat	100 saat
Boyutlar (G × D × Y)	Yaklaşık 210,5 mm × 235 mm × 88,5 mm			
Ağırlık	Yaklaşık 2,6 kg			
Standartlar	Güvenlik IEC60601-1, CSA60601-1, EN60601-1 EMC IEC60601-1-2, EN60601-1-2, ICES-003, FCC Class B Sertifikalar FDA Sınıf 1			
İsteğe bağlı aksesuarlar	Uzaktan kumanda ünitesi, ayak pedalı, klavye, kart/barkod okuyucu			
Kayıt Biçimi				
Fotoğraf	JPEG, DICOM (*.dcm)			
Video	MPEG-4 AVC/H.264			
Giriş/Çıkış				
Video Girişi	SDI (BNC) ×1	3G/HD-SDI: 1080p / 1080i / 720p, SD-SDI: 480i / 576i		
	DVI (tek bağlantı) ×1	Yüksek çözünürlük		
	S-Video ×1	NTSC, PAL		
	Kompozit (BNC) ×1	NTSC, PAL		
Ses Girişi	SDI (BNC) ×1	*Ortak kullanımdaki SDI video giriş terminali.		
	Stereo mini jak ×2	LINE, MIC		
Video Çıkışı	SDI (BNC) ×1	3G/HD-SDI: 1080p / 1080i / 720p, SD-SDI: 480i / 576i		
	DVI (tek bağlantı) ×1	Yüksek çözünürlük		
	S-Video ×1	NTSC, PAL		
	Kompozit (BNC) ×1	NTSC, PAL		
Ses Çıkışı	SDI (BNC) ×1	*Ortak kullanımdaki SDI video çıkış terminali.		
	Stereo mini jak ×1	LINE		
Diğer Arayüzler	RJ-45 (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T) ×1			
	USB 2.0 Tip A ×3	Kayıt yapılabilen aygıtlar için 2 ön konnektör		
	USB 2.0 Tip B ×1	İsteğe bağlı aksesuarlar için 1 arka konnektör		
	Stereo mini jak ×3	Dahili sabit disk erişimi için 1 arka konnektör (UR-4MD üzerinde)		

"Blu-ray™ Disc", "Blu-ray™" ve "Blu-ray™ Disc" logosu, Blu-ray™ Disc Association şirketinin ticari markalarıdır.

Bu belgede kullanılan diğer şirket adları, ürün adları ve logolar ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

* Özellikler ve teknik özellikler önceden haber vermeden değiştirilebilir.

TEAC AMERICA, Inc.

7733 Telegraph Road, Montebello, Kaliforniya, 90640
A.B.D.
Telefon: +1-323-726-0303 Faks: +1-323-727-7656
http://www.teac.com
E-posta: mrsales@teac.com
dssales@teac.com

TEAC EUROPE GmbH

Bahnstr.12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim
Almanya
Tel: +49 (0)611 7158-0
Faks: +49 (0)611 7158-393
E-posta: ipd-sales@teac.eu
http://www.teac.eu



Arka panel